

Es importante no mover el lector bruscamente cuando intenta localizar el microchip durante el proceso de lectura, en caso contrario, podría leerse únicamente el código del microchip pero no los teléfonos.

La posibilidad de incorporar números de teléfono a un microchip debe considerarse como un sistema complementario al oficial. De esta manera, el microchip debe ser igualmente registrado en su correspondiente base de datos.

Para grabar los números de teléfono en el microchip debe utilizar un software específico que puede encontrar en la siguiente página Web: <http://felixcan.com/FXPETII.HTML>

8. PRECAUCIONES DE USO

- No lo tire desde alto ni contra una superficie dura.
- No exponga el lector a una elevada humedad, a temperaturas superiores a 50°C ni a líquidos.
- No ponga nada sobre el lector que pueda presionar los botones de forma constante de forma que se descargue la batería.
- Si falla el lector, compruebe que la batería no está descargada antes de devolver el lector al servicio post venta.
- No intente reparar el lector usted mismo.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	150 x 80 x 35 mm
Peso	130 g
Tª de servicio	0°C a 50°C
Tª de almacenamiento	-10°C a 60°C
Batería	3.7 V 1400 mA. Recargable


Distancia de lectura	- FDX-B hasta 100mm - FDX-A / FECAVA hasta 65mm - HDX hasta 250mm
Frecuencia de transmisión	134,2 kHz
Interfaz	USB, BLUETOOTH
Accesorios	Cable USB
Normas	CE, FCC, ISO 11784, 11785

10. SERVICIO DE POST VENTA

Polígono Industrial Romica, Calle 1, Parcela 200 Apdo. Correos 274 - 02080 ALBACETE (España)
Tlf.: +34 967 52 01 87 Tlf. Asistencia Técnica: +34 967 25 47 78
<http://www.felixcan.com>
admin@felixcan.com

FELIXCAN ANIMAL ID

LECTOR FXPET II GUIA DE USUARIO

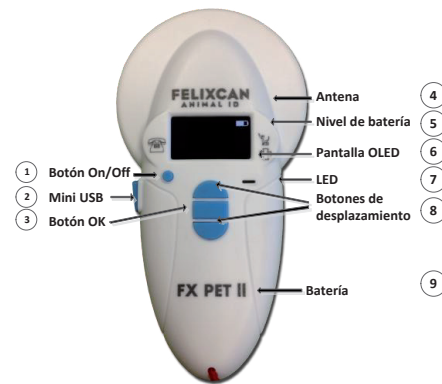

1. ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón *On/Off* (1) para encender el lector.

Para apagar el lector mantenga presionado el botón *On/Off* (1) durante tres segundos.

2. SELECCIÓN DE IDIOMA

Encienda el lector. Utilice los *botones de desplazamiento* (8) para seleccionar la opción del menú “*Idioma*”. Presione el botón *OK* (3) y use los *botones de desplazamiento* (8) para elegir el idioma que desee de entre los siguientes: español, inglés, francés italiano, portugués, alemán y polaco. Presione el botón *OK* (3) de nuevo para seleccionar la opción elegida. Esta preferencia quedará grabada en el lector aunque lo apague.


3. USO DEL DISPOSITIVO

Encienda el lector. En la *Pantalla* del dispositivo (6) aparecerá el mensaje “*Leer*”, presione el botón *OK* (3). La *pantalla* (6) mostrará el siguiente mensaje:



Apunte la antena del lector (4) hacia el microchip o bien al área de implantación del mismo.

El lector es capaz de leer los siguientes tipos de microchip: FDX-B y HDX (ISO 11784/85), FDX-A (Destron/FECAVA, Avid/FECAVA) y EM H4102. Al leer un microchip, se escuchará un pitido y en la pantalla (6) se mostrará su código:

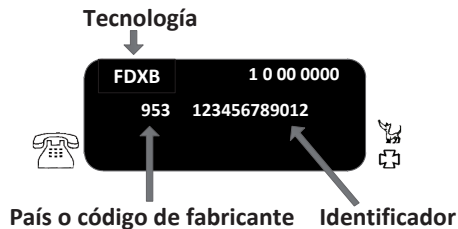

La pantalla anterior corresponde a la lectura de un microchip FDX-B.

Si el lector no puede encontrar el microchip, en la Pantalla (6) aparecerá el mensaje **“Identificador no encontrado”**.

El lector mostrará el código del microchip durante 3 minutos antes de apagarse automáticamente. Una vez que el lector se apague no será posible mostrar el código del último microchip leído.

4. MEMORIA

La memoria del lector puede almacenar hasta 1.000 códigos que pueden ser posteriormente transferidos a un PC con sistema operativo Windows®. Para Activar/Desactivar la opción de almacenar

estos códigos, encienda el lector y utilice los *botones de desplazamiento* (8) para navegar hasta la opción **“Memoria”** y pulse el botón OK (3). Utilice los *botones de desplazamiento* (8) para seleccionar las opciones **“Activar”** o **“Deshabilitar”**. Para finalizar, pulse el botón OK (3).

Una vez activada la memoria, ésta no podrá ser desactivada hasta que transfiera los datos. Para realizar esta acción acceda a la opción **“Memoria”** y posteriormente a la opción **“Enviar”**. Pulse el botón OK (3) para enviar los datos. Después de realizarse esta acción aparecerá un nuevo mensaje: **“Marcar OK para borrar”**. Si pulsa el botón OK(3) borrará todos los datos almacenados.

5. CONECTAR EL LECTOR A UN ORDENADOR

Para conectar el lector a un ordenador se incluye un cable USB. En la dirección Web <http://www.felixcan.com/fxpetii.html> encontrará el software gratuito **Datatransfer**. En esta URL también puede encontrar instrucciones sobre el uso de este software y el uso del Bluetooth.


6. RECARGA DE LA BATERÍA

La batería recargable del lector permite varios miles de operaciones de lectura. Utilice el cable suministrado conectándolo al *puerto Mini USB* (2) para su carga. El *LED* (5) de color rojo indica que la recarga está en proceso y el *LED* (5) de color verde indica que la carga está completa. El lector dispone de un indicador de nivel de la batería (5).

7. LECTURA DE TELEFONOS

El lector dispone de una novedosa función que permite escribir y leer números de teléfonos en la memoria de microchips compatibles.

Si procede a la lectura de un microchip que incluye números de teléfonos, escuchará tres pitidos y obtendrá en pantalla un resultado similar a éste:

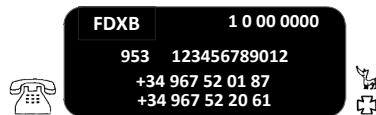

Las dos últimas líneas muestran, respectivamente, los números de teléfono del propietario y del veterinario del animal.